

Electric Ear Cleaning Kit kézikönyv

Használat előtt olvassa el figyelmesen és teljesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi referenciaként!


Óvintézkedések

Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, figyelmeztetést és tippet. A nem megfelelő használat súlyos személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.

1. Ne tegyen maró folyadékot a termékbe, hogy elkerülje az emberi test és a termék károsodását.
 2. Normális, ha nyomást érez, de fájdalmat nem. Ha fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvosához szakmai segítségért.
 3. Gyermekek vagy fogyatékkal élők felnőtt vagy gyám felügyelete mellett használhatják a terméket.
 4. Ez a termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől.
 5. Ez a termék akkumulátorral van felszerelve. Tartsa távol tűztől, nedvességtől és magas hőmérséklettől. Túlmelegedés miatt felrobbanhat.
 6. Ha nem használja a terméket, tárolja száraz helyen.
 7. Győződjön meg róla, hogy megfelelő DC5V tápegységet csatlakoztat a termék töltéséhez.
 8. Ne használjon testhőmérséklet alatti oldatokat a kényelmetlenség elkerülése érdekében. Langyos víz (nem túl forró az égési sérülések elkerülése érdekében) használata javasolt.
 9. Ne változtassa vagy módosítsa a terméket, és ne szerelje szét a belső berendezéseket, ellenkező esetben károsíthatja a terméket vagy személyi sérülést okozhat.
 10. Ne sorolja háztartási hulladék közé. Ha már nincs szüksége erre a termékre, kérjük, használja a helyi önkormányzat újrahasznosítási eljárását, és vigye el egy helyi elektromos berendezés-újrahasznosító állomásra.
- Jó tanácsok: A kézikönyvben található összes kép csak tájékoztató jellegű. A termékfrissítések vagy -fejlesztések miatt eltérések lehetnek a tényleges termék és a kép között, kérjük, vegye figyelembe a tényleges terméket.


Hibaelhárítás

1. Ha a termék nem kapcsolható be, töltse fel az alacsony akkumulátorszint elkerülése érdekében.
2. Ha a termék teljesen feltöltve rövid üzemidővel rendelkezik, töltse és használja 15-35°C közötti környezeti hőmérsékleten; vagy ha a töltési idő nem elegendő, töltse fel.
3. Ha a LED fény nem világít töltés közben, ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva.
4. Ha a víznyomás túl alacsony, cserélje ki a fülbetéteket újakra az eltömődés vagy sérülés elkerülése érdekében, vagy válasszon erősebb üzemmódot szükség szerint.

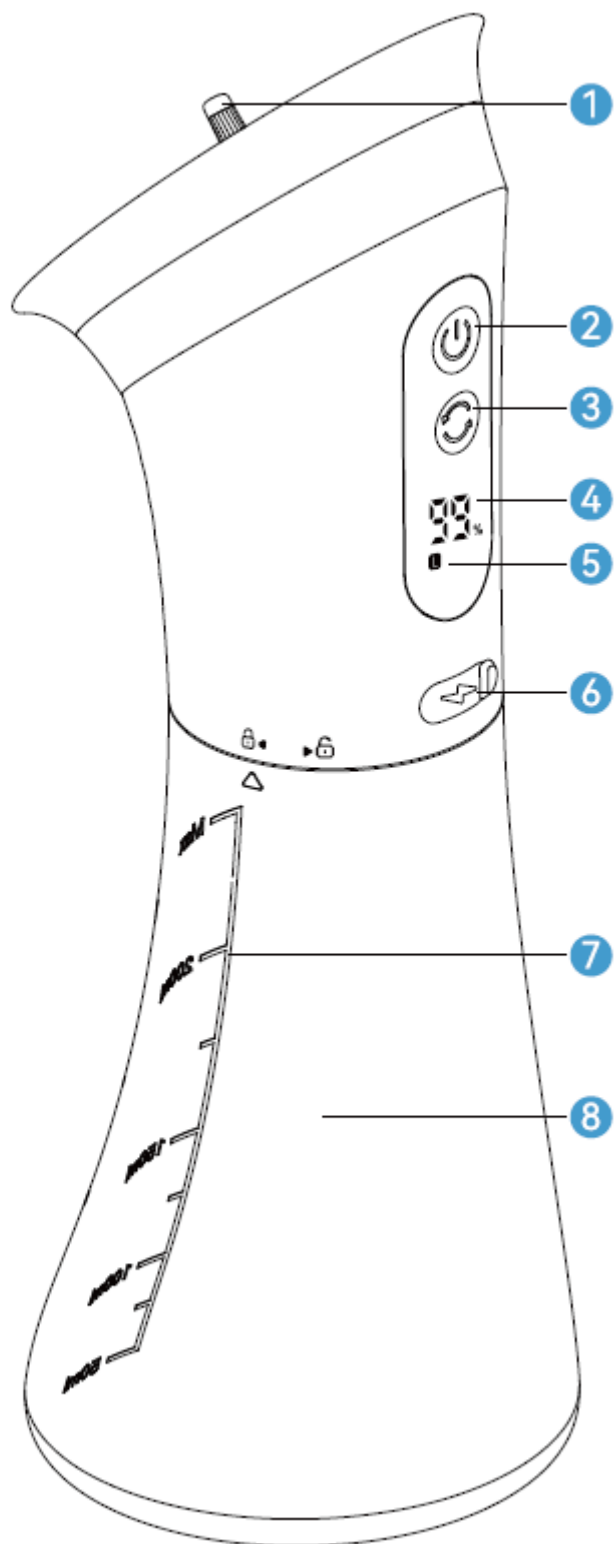

Termék bemutatása

1. Fúvóka

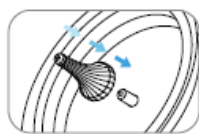

2. Többfunkciós be- / kikapcsoló gomb



3. Teljesítmény mód gomb




4. Akkumulátor kijelző



5. Teljesítmény mód kijelző




6. Type-C töltőport

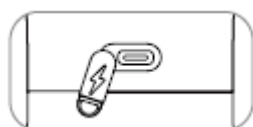

7. Vízzintskála



8. Kétrekeszes víztartály

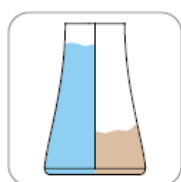

Funkciók bemutatása

1. Fúvóka

1-, 3- és 5-lyukú fúvókákkal felszerelve, a különböző fúvókák a tényleges igények szerint cserélhetők. Minél több lyuk van a fúvókán, annál kisebb a permetezési erő.

2. Többfunkciós be- / kikapcsoló gomb

Nyomja meg 1 másodpercig a termék bekapcsolásához, nyomja meg 1 másodpercig a termék kikapcsolásához, és röviden nyomja meg a termék indításához/szüneteltetéséhez.

3. Teljesítmény mód gomb

Rövid megnyomással válthat a különböző teljesítmény üzemmódok között, különböző teljesítményen történő működéshez.

4. Akkumulátor kijelző

Az akkumulátor töltöttségi szintje valós időben jelenik meg töltés és normál használat során.

5. Teljesítmény beállítási kijelző

L Alacsony

P Pulzáló

H Magas

6. Type-C töltőport

Kérjük, használjon 5V1A töltőt és Type-C töltőkábelt a termék töltéséhez. Töltés után az USB csatlakozót be kell helyezni, hogy megakadályozza a folyadék bejutását és a termék károsodását.

7. Vízzintskála

Öntse a folyadékot a víztartályba a ténylegesen szükséges folyadékmennyiség és a referencia skála szerint.


8. Kétrekeszes víztartály

A víztartályban lévő folyadék elkülöníthető és külön tárolható. Miután a tiszta folyadék átöblítette a hallójáratot, a víztartály másik felébe tárolható a felhasznált folyadék.


Óvintézkedések

Az eszköz első használata előtt öblítse ki a víztartályt, és hagyja levegőn megszáradni. Töltse fel az eszközt az USB-C kábellel.


1. Tartsa a főegységet egyik kezével, a víztartályt a másik kezével, forgassa el a víztartályt, és húzza le a eltávolításához. A víztartály két folyadéktároló rekeszre van osztva bal és jobb oldalon. (A kép)

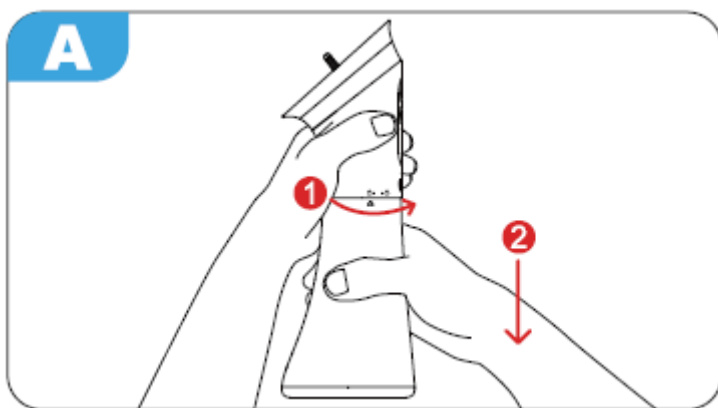


2. Adja hozzá a szükséges folyadékot, és tekintse meg a készülék testén található skálát a folyadéktároló tartály tényleges kapacitásához. A folyadék feltöltése után fogja meg a főegységet az egyik kezével, a víztartályt a másik kezével, tolja fel, és forgassa el, hogy összeszerelje az egész géphez. (B kép)

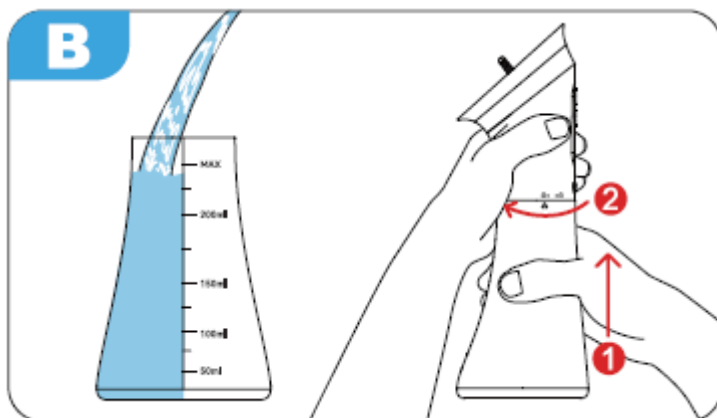

3. Választhat 1-, 3- vagy 5-lyukú fúvókákat, amelyeket a gép vízkivezetésébe helyezhet. Az első használatkor ajánlott az 5-lyukú fúvókát választani, hogy megszokja a permetezés intenzitását. (C kép)

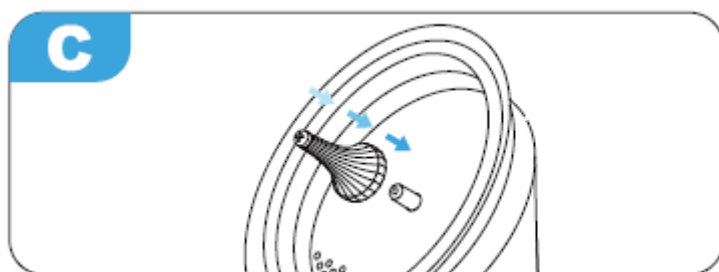

4. Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot, az eszköz bekapcsol, a LED fény mutatja az energiaszintet, a kapcsolódó jelzőfény villog, és a funkció szünetel. (D kép)

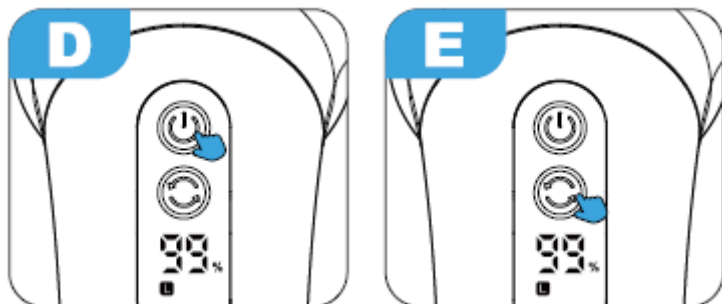



5. Állítsa be a nyomást, röviden nyomja meg a nyomáskapcsoló gombot, és válassza ki a megfelelő erőt. 3 mód közül választhat: alacsony nyomású szint, pulzáló szint és magas nyomású szint (első használatkor ajánlott az alacsony nyomású ütéssel kezdeni). (E kép)

6. Miután beállította az eszköz funkcióit, óvatosan helyezze be a gép fúvókáját a hallójáratba a megfelelő mélységig, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a fültisztító elindításához.



7. Amikor mossa a jobb fülét, döntse a fejét jobbra, hogy a víz és a fülzsír kifolyjon. Amikor mossa a bal fülét, döntse a fejét balra, hogy a víz és a fülzsír kifolyjon. (F kép)

8. Öblítéskor a kifolyó folyadék automatikusan a gép folyadéktároló tartályába áramolhat, és nincs szükség külön víztartályra a gyűjtéséhez. (G kép)

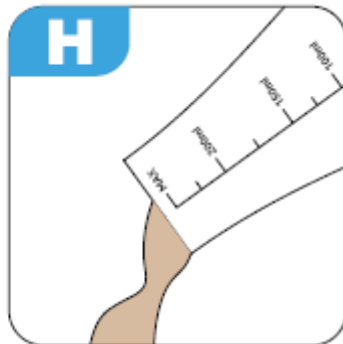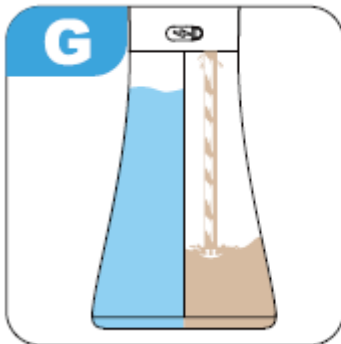

9. Használat után kapcsolja ki az eszközt, és ürítse ki a maradék folyadékot a víztartályból és a gépből, hogy az eszköz száraz maradjon. (H kép)

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.

1. Nyissa ki a vízbevezető nyílást, fogja meg a készülék főttestét a jobb kezével, és húzza ki a víztartályt a bal kezével. (I. ábra)



2. Vegye ki a víztartályt, öblítse le a víztartály belsejét és külsejét vízzel, majd hagyja levegőn megszáradni. (J. ábra)

2. Csere

Miután a fúvókát 90 napig használták, ki kell cserélni egy újra.

3. Tárolás

Törölje le a készüléket tiszta, nedves ruhával. Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz száraz, majd tárolja hűvös és száraz helyen.

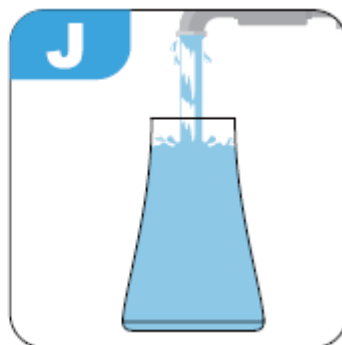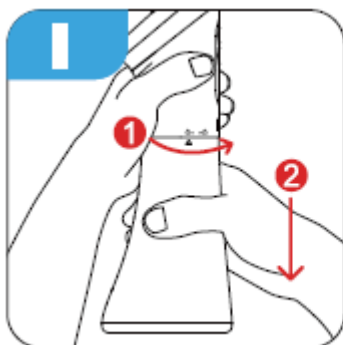

FIGYELMEZTETÉS!

1. Ne merítse vízbe az eszközt a károsodás elkerülése érdekében.
2. Kerülje az erős vegyszerek használatát. Tisztításhoz mosogatószerrel vagy meleg vizet használjon, ne erős vegyszereket vagy oldószereket.

Környezetvédelem

1. Megfelelő ártalmatlanítás: Az öblítő vagy alkatrészeinek ártalmatlanításakor kövesse a helyi elektronikai hulladéokra vonatkozó előírásokat és irányelveket, és kerülje a normál háztartási hulladékkal való kidobását.
2. Akkumulátor-újrahasznosítás: A tölthető akkumulátorokat megfelelően hasznosítsa újra. Ellenőrizze a helyi létesítményeket vagy gyűjtőpontokat az akkumulátor-újrahasznosításhoz.
3. Energiahatékonyság: Takarítson meg energiát az öblítő kikapcsolásával, amikor nincs használatban, és a töltő kihúzásával, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Töltési utasítások

Kérjük, használja a termékhez mellékelt Type-C töltőkábelt az eszköz töltéséhez.

1. Töltés előtt kapcsolja ki az eszközt, és győződjön meg róla, hogy nincs használatban.
2. Tartsa távol az eszközt és a töltőt víztől, hogy elkerülje az elektromos veszélyeket.
3. Az LCD kijelző beépített töltöttségi szint kijelzővel rendelkezik az energiaszint könnyű ellenőrzéséhez.
4. Teljes feltöltés után válassza le az eszközt a töltőről.

SKU: earpure_BL110

Termék neve: Electric ear cleaning kit

Referencia szám: 7/2026

Modell szám: E80

Bemenet: Type C DC 5V/1A

Teljesítmény: 1,55W

Akkumulátor kapacitás: 2000 mAh

Töltési idő: 3 óra

Víztartály kapacitás: 230 ml

Gyártó: Shenzhen Sulang Technology Co.,Ltd.

C szoba, 18. emelet, 12. épület, Lehui Science and Innovation Center, Jihua út 489., Bantian utca, Longgang kerület, Shenzhen, Guangdong tartomány Emelet,

12. épület, Lehui Science and Innovation Center, Jihua út 489., Bantian utca, Longgang kerület, Shenzhen, Guangdong tartomány

Importőr és meghatalmazott képviselő: DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia
Kínában gyártva

FIGYELMEZTETÉS! Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A nem megfelelő használat súlyos sérülést okozhat!

Enyhe nyomás érezhető a használat során, de fájdalom nem léphet fel.

Ha bármilyen fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon egészségügyi szakemberhez.





**UK
CA**

